


## CANINOS: INSTRUCTIVO TOMA DE MUESTRA POR MEDIO DE CITOBRUSH/CEPILLO CITOLÓGICO BUCAL

- El test puede efectuarse a partir de las 8-10 semanas de edad. Para evitar el periodo de lactancia a fin de no arrastrar células provenientes de la madre.
- Si hubiera ingerido alimentos, esperar 30 minutos antes de tomar la muestra.

- Para la toma de la muestra: emplear citobrush (cepillo citológico también utilizado en humanos para papanicolau). Remitir 2 cepillos en un sobre identificado con los datos del propietario y del animal. Los cepillos podrán ser retirados



del Laboratorio o bien podrán ser adquiridos en farmacias y comercios de insumos médicos. Deberá completarse además, la información restante en la Solicitud de Análisis (descargar de [www.sra.org.ar/laboratorio](http://www.sra.org.ar/laboratorio)).

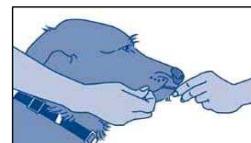

- La muestra se toma colocando el cepillo dentro de la boca del animal y frotándolo, de 10 a 12 veces, contra la cara interna de la mejilla; evitando recoger la saliva del animal. El diagnóstico se realiza sobre el ADN presente en las células, por lo cual la saliva no es un material válido. Dejar secar 10 segundos sosteniendo el hisopo con la mano una vez tomada la muestra.
- Los cepillos pueden conservarse durante semanas y enviarse a temperatura ambiente.
- Si se toma más de 1 muestra, es necesario lavarse las manos entre tomas, a fin de evitar la contaminación cruzada de las muestras, y enviarlas en sobres diferentes.
- Los análisis se completan en 15 días hábiles y los certificados se remiten vía email o pueden ser retirados del Laboratorio por el dueño o persona autorizada por el mismo.
- Para mayor información comunicarse al: Laboratorio de Genética Aplicada, Juncal 4431, 2° piso. Horario de atención: 8-14h. Te: 011-4771-1366/1982. e-mail: [infolab@sra.org.ar](mailto:infolab@sra.org.ar).