



Sociedad Rural Argentina

Laboratorio de Genética Aplicada
Juncal 4431 2do Piso
1425 - Buenos Aires
Tel/Fax:4771-1366/1982
e-mail: infolab@sra.org.ar

MUESTRA DE SANGRE PARA ADN

- CANINOS -

- 1) NO ES NECESARIO AYUNO PREVIO, Y SE PUEDE REALIZAR A CUALQUIER EDAD DEL ANIMAL
- 2) **ANTICOAGULANTE: IMPORTANTE avisar al veterinario que NO se debe usar heparina como anticoagulante (interfiere con las determinaciones)**
USAR: EDTA (puede ser EDTA2K o EDTA3K) o Citrato de Sodio (9NC o 4NC)
Volumen de sangre: desde 1 ml de sangre (ideal de 2-5 ml). Por cada 5 ml de sangre debe colocarse 0.5ml de anticoagulante.
- 3) EVITAR HEMÓLISIS DE LA SANGRE, NO HACER MUCHA SUCCIÓN CON LA JERINGA (es preferible tomar poca cantidad pero sin coagulo o hemólisis)
- 4) HOMOGENEIZAR SUAVEMENTE LA SANGRE CON EL ANTICOAGULANTE
- 5) ROTULAR EL TUBO CON CINTA Y DETALLAR EL NOMBRE DEL EJEMPLAR COMO FUE IDENTIFICADO EN LA PLANILLA DE SOLICITUD.
- 6) ENFRIAR EL TUBO CON SANGRE EN HELADERA (**NO congelar**)
- 7) LAS MUESTRAS Y LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES, DEBERAN PRESENTARSE EN EL LABORATORIO (Juncal 4431, 2º. CABA. C.P: 1425) EN EL HORARIO DE 8 A 14 hrs, DENTRO DE LAS **48 hrs.** DE EFECTUADA LA EXTRACCION, de ser posible incorporar en el envío pack refrigerante.

PARA ENVÍOS DESDE EL INTERIOR: El laboratorio hace recepción de muestras de lunes a viernes. Por ello se recomienda realizar el envío lunes o martes para garantizar su recepción durante la semana, no retiramos encomiendas.